

AllCheck hCG Card

올체크 에이치씨지 카드



개인용 임신내분비물질 검사지

정상적인 임신의 경우, 수정란이 착상된 자궁내벽에는 수정란에 영양분을 공급하기 위한태반이 발달합니다. 이때, 태반에서는 융모성선자극호르몬(human Chorionic Gonadotropin, hCG)이 만들어지게 됩니다. hCG 는 자궁내막 수정란 착상 이후, 급속히 분비되는 호르몬으로 소변과 혈액으로 분비되는데, 본 제품(AllCheck hCG Card)은 소변 중의 hCG 를 면역크로마토그래피 측정법을 이용하여 간편하게 검사함으로써 임신 여부를 판정할 수 있는 체외임신진단시약입니다. 본 제품의 검출 한계는 hCG 25 mIU/mL 입니다.

사용 목적

뇨중의 hCG 정성검사


제품 구성

1. 검사용 디바이스 × 25 Tests
2. 드롭퍼 × 25EA
3. 사용 설명서

사용 방법

1. 검사 방법

- 모든 검체와 시약은 냉장 보관하였을 경우 검사를 시작하기 15~30분 전에 실온에 둡니다.
- 포장용기를 개봉한 뒤 검사용 디바이스를 꺼내서 편평한 곳에 둡니다.
▶ 디바이스가 습기에 노출되면 제품의 성능이 저하될 수 있으므로 오래 방치하지 마십시오.
- 소변 100 μ l(3 방울)을 적당한 피펫으로 취하여 검체점적부위(S)에 분주합니다.
- 검사 개시 후 5~10분에 결과를 판정합니다.

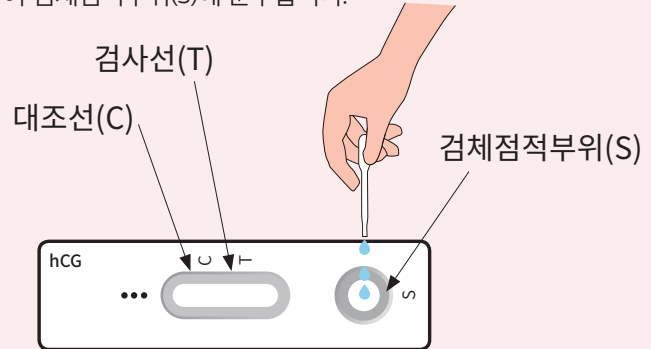


2. 정도 관리


모든 검사 결과는 대조선(C)에 적색 또는 보라색의 선이 나타나야 합니다.

3. 결과 판정

- 음성: 대조선(C)에만 색띠가 나타나는 경우

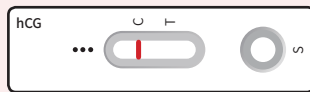

- 양성: 대조선(C)과 검사선(T)위치에 색띠가 나타나는 경우, 검사선(T)이 대조선(C)에 비해 약하거나 진하게 나오더라도 양성으로 판정

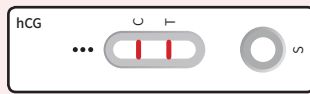

- 재시험: 대조선(C)위치에 색띠가 나타나지 않는 경우



▶ 재시험의 경우는 검체량 부족 등으로 검사가 잘못되었을 경우이거나, 시약의 품질에 문제가 있을 가능성이 있으므로 새로운 소변을 채취하여 새로운 테스트 키트로 다시 시험합니다.

- 검사선(T)의 색띠가 희미할 경우

성관계 7 일 후부터 생리예정일까지의 임신호르몬 양이 너무 적어 희미하게 나타날 수 있으므로 정확한 검사를 위해서는 생리예정일 이후에 검사하는 것이 좋습니다.

- 양성(임신)으로 판독되었으나 예정대로 생리가 시작되는 경우

다른 원인의 가능성을 알아보기 위하여 전문의와 상의하십시오.

- 음성(비임신)으로 판독되었으나 예정대로 생리가 시작되지 않을 경우

3일 후 재검사하면 보다 명확한 결과를 얻을 수 있으나, 그래도 음성(비임신)으로 판독되면 다른 원인의 가능성을 알아보기 위하여 전문의와 상의하십시오.

주문 정보

품번	품명	유형	포장단위	검체 종류	보관조건	유효기간
CHR12	AllCheck hCG Card	Device	25T/Box	Urine	2~30°C	18개월